



# SAISIR ET ENVOYER DES ÉCHANTILLONS


## Instructions

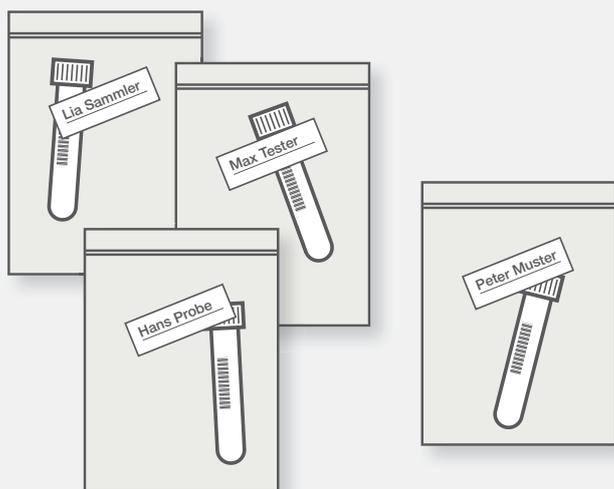


**1** Préparer les sachets contenant les échantillons (chacun étiqueté avec le nom ou le numéro personnel de la personne testée).

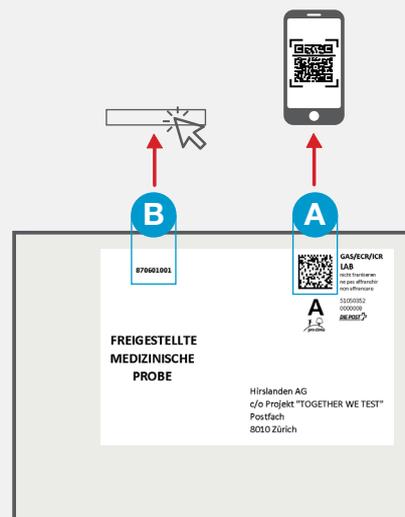

**2** Prendre l'enveloppe d'expédition et saisir le code d'affranchissement dans la plateforme : soit scanner le code (A), soit saisir le numéro d'envoi (B).

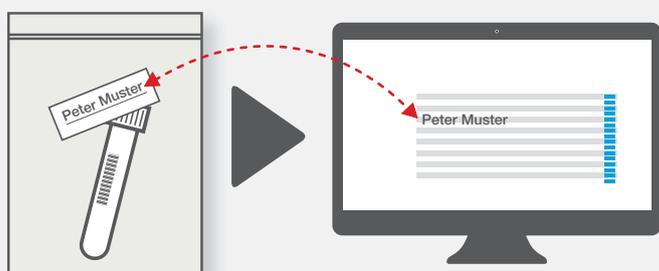

**3** Prendre un sachet d'échantillon et chercher la personne dans la liste affichée par son nom ou son numéro personnel.

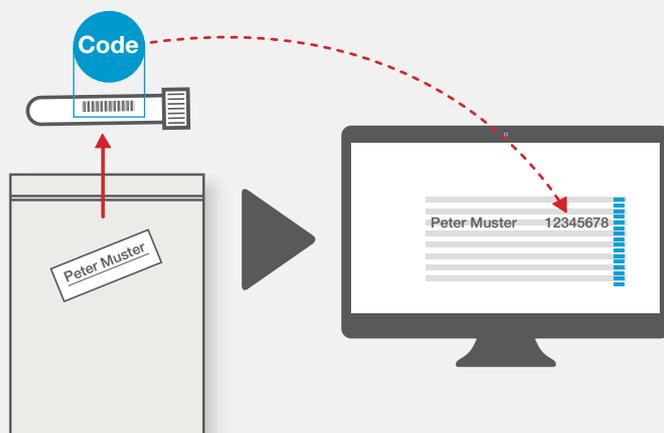


**4** Retirer le tube d'échantillon du sachet et saisir (scanner ou taper) le code-barres et enregistrer.

# SAISIR ET ENVOYER DES ÉCHANTILLONS

## Instructions



**5** Placer le tube d'échantillon dans l'enveloppe d'expédition saisie.

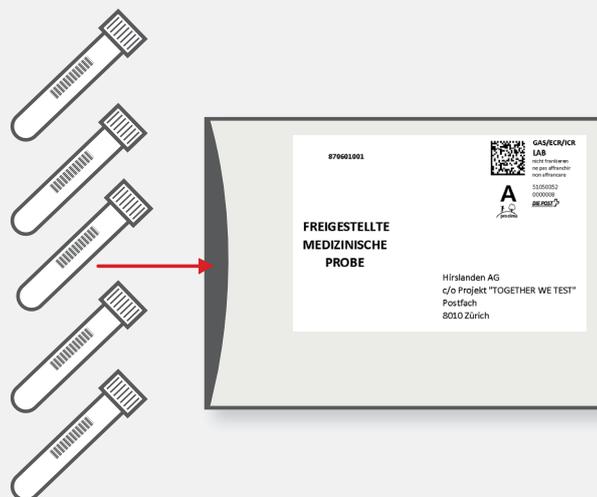

**6** Répéter le processus à partir du point 3 et ajouter des échantillons à l'enveloppe (au moins 4 et au maximum 10 échantillons par enveloppe).



**7** Bien fermer l'enveloppe et la remettre à la poste (si possible à un guichet).